

TOTO トイレ用手すり (EWC210R) 施工説明書

■ 取付けが終わりましたら、この施工説明書をお客様にお渡しください。

安全上の注意

■ 安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
		してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。
		必ず実行していただく「強制」内容を伝えるものです。

注意



必ず実行

トイレ用手すりを取付けの際は、付属の本体取付ねじでしっかりと床に固定する。コンクリート床の場合、ドリル径、下穴深さを守る。

製品がはずれてけがをするおそれがあります。



必ず実行

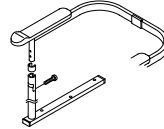
トイレ用手すりを取付けの際は、木床の場合、取付床下地12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、コンクリート床の場合、圧縮強度210kgf/cm²以上のコンクリート床を使用する。

製品がはずれてけがをするおそれがあります。




必ず実行

脚フレームと上フレームは、付属のねじでしっかりと固定する。上フレームがはずれて、けがをするおそれがあります。



必ず実行

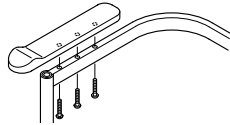
木製アームレストと上フレームは付属のねじでしっかりと固定する。木製アームレストがはずれて、けがをするおそれがあります。



① 部品の確認 ※梱包を開け、下表を参考のうえ部材・部品の有無を確認ください。

部材	脚フレームR	脚フレームL	上フレーム	木製アームレスト	樹脂袋	ねじ袋
個数	1	1	1	2	1セット	1セット
材質	鋼管・ステンレス	鋼管・ステンレス	鋼管	天然木	樹脂	ステンレス
姿図						

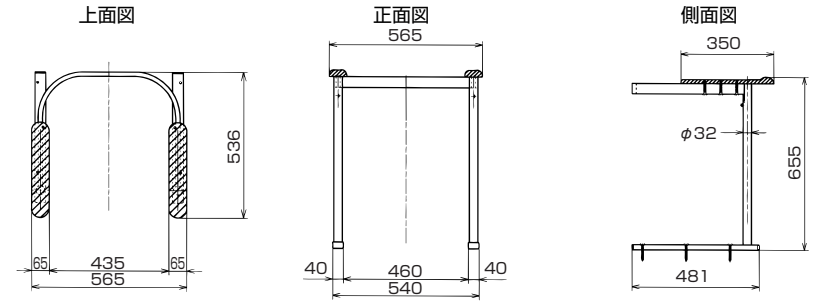② 製品寸法



③ 組立の前に

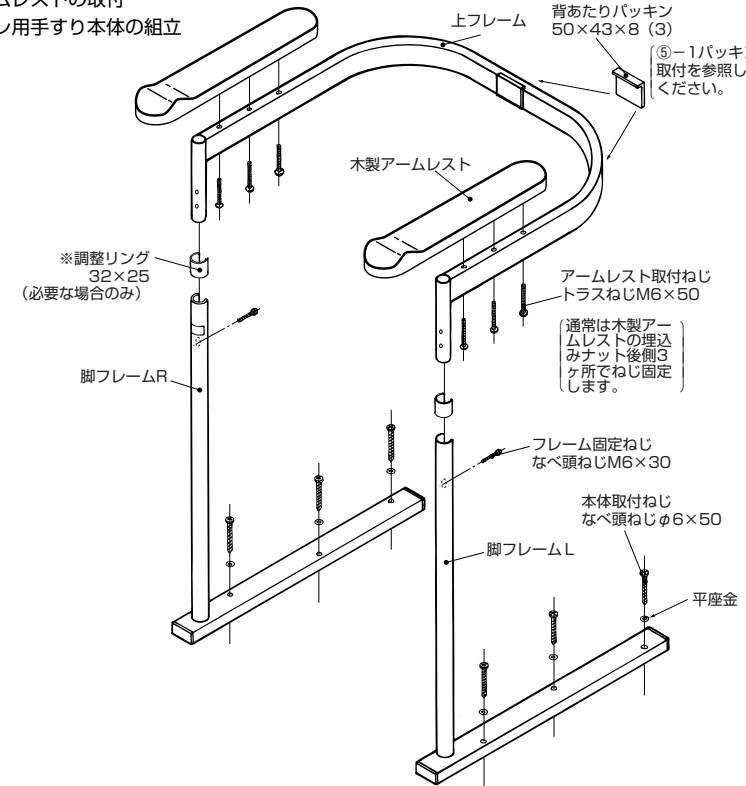
■ 高さ調整機能・アームレスト前後調整機能があります。(共に2段階調整式)

この機能を十分に活用して使いやすい状態にしてください。

※⑥「使い易くするための調整方法」の
高さ調整・アームレスト位置の調整を参照してください。









④ 組立図

1. アームレストの取付
2. トイレ用手すり本体の組立



⑤ 取付方法

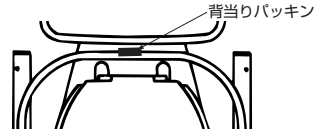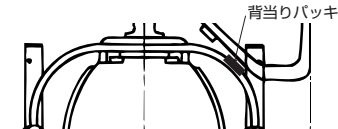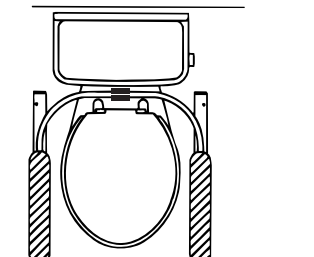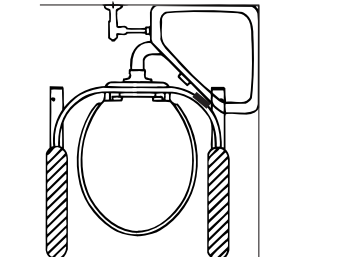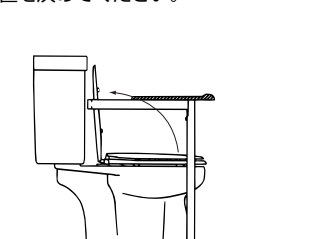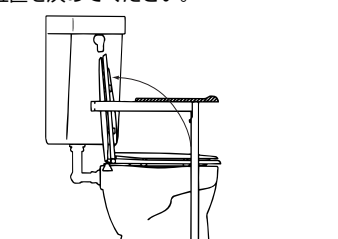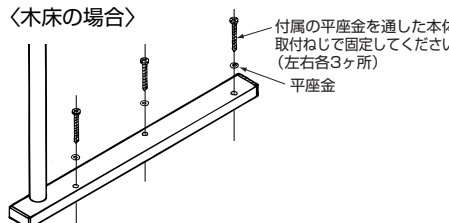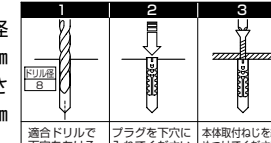■取付工事の前にこの取付方法をよくお読みの上、順番に正しく取付けてください。

	タンク密結形・レストパル	隅付ロータンク
1 パッキン取付	背当りパッキンを取付けてください。 	背当りパッキンを取付けてください。 
2 仮置き	便器の中心に来るように置いてください。 	便器の中心に来るように置いてください。 
3 便ふた・便座立ち確認	ロータンクからのすき間・便座の自立を確認して取付位置を決めてください。 	ロータンクからのすき間・便座の自立を確認して取付位置を決めてください。 
4 床固定	<p>〈木床の場合〉</p>  <p>付属の平座金を通した本体取付ねじで固定してください。(左右各3ヶ所) 平座金</p> <p>取付後がたつきがないか確認してください。</p>	<p>〈コンクリート床の場合〉</p> <p>■別売EW59019 (コンクリートプラグ) をご使用ください。</p>  <p>適合ドリル径 8mm 下穴深さ 55mm</p> <p>適合ドリルで下穴をあける。 プラグを下穴に入れてください。 本体取付ねじを締めてください。</p>

⚠️ 注意



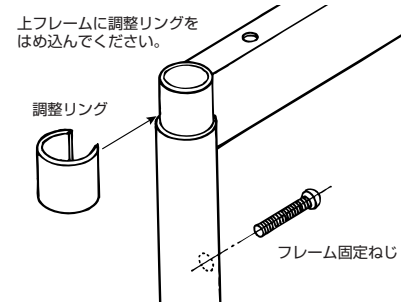
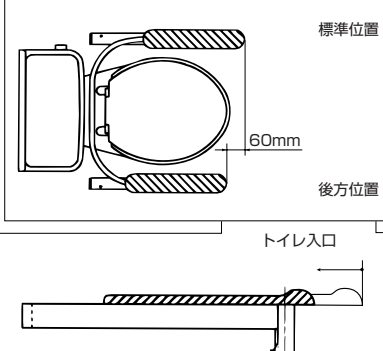
トイレ用すりを取付けの際は、付属の本体取付ねじでしっかりと床に固定する。コンクリート床の場合、ドリル径、下穴深さを守る。本体がはずれてけがをするおそれがあります。



トイレ用すりを取付けの際は、木床の場合、取付床下地12mm以上の構造用合板 (JAS規格品)、コンクリート床の場合、圧縮強度210kgf/cm²以上のコンクリート床を使用する。本体がはずれてけがをするおそれがあります。

⑥ 使い易くするための調整方法

■トイレ用すりには高さ調整機能・アームレスト前後調整機能があります、この機能を活用して使い易い状態にしてください。

	木製アームレスト高さ調整	木製アームレストの位置調整
調整方法	<p>■通常は調節リングは使用しません。</p> <p>■車いす対応便器 (C780AB・C710A) 車いす対応便器台 (HP700F) をお使いの方は調整リングを使用して高い位置でねじを固定してください。</p>  <p>上フレームに調整リングをはめ込んでください。</p> <p>調整リング</p> <p>フレーム固定ねじ</p> <p>■25mm標準より高くなります。</p>	<p>■通常は標準位置に取付けます。</p> <p>■横側入口でトイレへの出入りの際アームレストがじゃまになる時にはアームレストを後方に下げてください。</p>  <p>標準位置</p> <p>60mm</p> <p>後方位置</p> <p>トイレ入口</p> <p>木製アームレストの埋込みナット前側3ヶ所をねじ固定してください。</p> <p>■60mm標準より前出が少なくなります。</p>

⚠️ 注意



必ず実行

脚フレームと上フレームは付属のねじでしっかりと固定する。上フレームがはずれて、けがをするおそれがあります。



必ず実行

木製アームレストと上フレームは付属のねじでしっかりと固定する。木製アームレストがはずれて、けがをするおそれがあります。

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

修理についてのご用命は東陶メンテナンス株式会社へ

0120-1010-05
受付 (年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
：上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理 (年中無休)
営業時間： 9:00～18:00

修理部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

0120-8282-55
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)