


W:95
H:190

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

トイレアームレストの使いかた

操作方法

- **アームレストを上げる場合**
アームレストを持ってゆっくり上げる
- **アームレストを下げる場合**
アームレストを水平まで確実に下げる

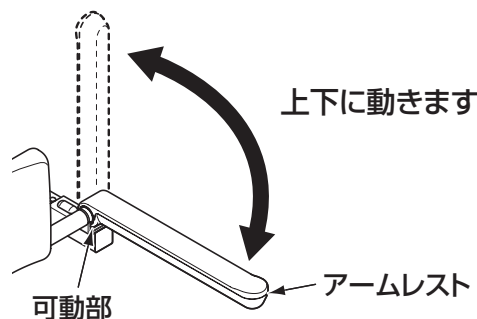

警告

使用時や点検時に大きな変形やガタツキ、破損などの異常があるときは、使用を中止し、速やかに修理を依頼する

アームレスト、背もたれの破損や脱落により転倒し、けがをするおそれがあります。



必ず実行

アームレストとその他器具の間に首など身体が入り込まないように十分に注意して使用する

身体が挟まるなどにより、重大事故につながるおそれがあります。

アームレストを操作するときは、可動部に手を置かない

可動部に手を挟んでけがをするおそれがあります。



禁止

アームレストをはね上げているときは、手すりとして使用しない

アームレスト部分が可動することにより転倒し、けがをするおそれがあります。

EWP02032R

お願い 上のラベルは壁面など見えやすいところへおはりください。